

## Destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura che normalmente si risolvono per seconda intenzione.

L'effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tissutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce la formazione del cheloide, mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l'effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tissutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara.

## Modalità di applicazione

### FIALA GEL 5ml

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Holoil® e massaggiare fino a completo assorbimento; coprire, se necessario, la ferita con cerotto traspirante per proteggere la lesione. Ripetere la medicazione quotidianamente fino a completo risanamento. In caso di micosi e onicomicosi si consiglia di continuare l'applicazione di Holoil® per 15 giorni dopo la completa rigenerazione.

## Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tissutale è minore di 30 mmHg di O<sub>2</sub>.

## Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tissutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascolarizzazione della lesione.

## Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tissutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare ad una temperatura compresa tra 10°C e 25°C.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

[www.rimos.com](http://www.rimos.com) - [info@rimos.com](mailto:info@rimos.com)

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente

NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI

INCI formulazione gel Fiala 5ml 

**Componenti:** Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

**Eccipienti:** Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Carbomer; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

Rev. 14 di Aprile 2022

La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE<br>SOLARE E DA FONTI DI CALORE | <br>CONSERVARE IN LUOGO<br>ASCIUTTO       | <br>CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA<br>COMPRESA TRA +10°C E +25°C | <br>MATERIALE RICICLATO<br>E' O RICICLABILE    |
| <br>LOT NUMERO DI LOTTO                                            | <br>REF CODICE PRODOTTO                   | <br>QUANTITÀ STIMATA                                            | <br>FABBRICANTE                                |
| <br>DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO<br>PUO' ESSERE USATO             | <br>LEGGERE ATTENTAMENTE<br>LE AVVERTENZE | <br>LEGGERE ATTENTAMENTE<br>LE ISTRUZIONI PER L'USO             | <br>DOPO L'USO NON DISPERDERE<br>NELL'AMBIENTE |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | <br>DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE<br>DOPO I MESI INDICATI      |                                                                                                                                   |

COD.INT. ISTHOL5G

[www.rimos.com](http://www.rimos.com) - [info@rimos.com](mailto:info@rimos.com)

CE 0051



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso



Non disperdere nell'ambiente